

# のせかえくんスライド

心を形にするテクノロジー、あります。  
TAKANO HeartWorks

スツと滑らせるだけ！



差し込みや抜き取りも簡単でスムーズな移乗が行えます。安心して使えるように工夫した形状とイラスト入りで、分かりやすく安心。居室に置いておいても、オレンジ色で明るいイメージです。蛇腹の特殊形状により、様々な角度の車いすやストレッチャーへ移乗が可能です。

**抜き差ししやすい形状**  
セラピストの方と一緒に考えた角度と形です。

**説明があってわかりやすい**  
移乗方法のポイントをイラストで入れています。事前に確認することもできて、安心です

肩をボードの目に合わせます

**ベッドの柵にかけられる**  
折りたたんで持ち運び、ベッドサイドにも引っかけられ、いつでもさっと使えます  
※ 市販のフックなどをご利用ください

**お体に乗せる目安に**  
目のあたりに肩甲骨がくるように合わせ、半身がボードの上に乗るようセットします

**● 移乗方法** ▶ 裏表紙の二次元コードから使用動画が視聴できます

1

車いすとベッドの角度を合わせます

2

側臥位にするなど差し込みます

3

のせかえくんスライドに利用者の身体をのせ、身体をシートごとやさしくスライドさせ移乗します

のせかえくんスライドをはずします

## のせかえくんスライド

■品番	TB-503	(単位 mm)
サイズ	W505×D1250×H10	
重量	2 kg	
耐加重	160 kg ※移乗を行う機器同士の隙間が10 cm以内の場合	

●材質 / ナイロン・ポリプロピレン・ポリエチレン  
JANコード：4523725006400  
TAISコード：00297-000119

