

SCOPE Lite

スコープライト

全自動運転
高性能エアマットレス



リモコンの全自動スイッチを押すだけで、

- さまざまな身体状態の利用者様に適応
 - 身体状態が悪化または回復に変化した場合も対応
- 以上をマットレスが自動運転で対応します

よって、「ボタン操作（マニュアル操作）は一切不要」です
利用者様の状態が変化した際にも、リモコンの設定変更が不要なため、設定ミスも防げます

臥床時の圧対策


- ① さまざまな身体状態の利用者様への適応
- ② 悪化時や回復時への適応

マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います
利用者様の身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えて悩まれる必要はありません

臥床時(スタート)


静止-体圧調整

30分間体動がなかったら

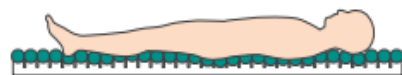


除圧-圧切替

30分間体動がなかったら

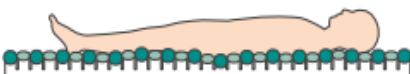

除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換

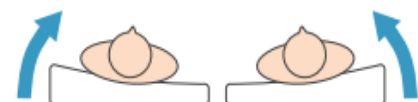


- ③ ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します

自動で「背抜き」を行い 圧による苦しさを緩和します

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります

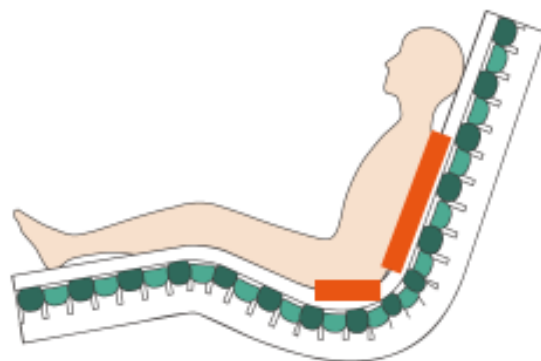

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります

全自動運動 高性能エアマットレス

* 臀部周辺の圧の可視化機能がないモデル

| 品番 | マットサイズ (cm) | | | 重量 (kg) | TAISコード |
|----------|-------------|-----|----|---------|--------------|
| | 幅 | 長さ | 厚さ | | |
| MSCPL91 | 91 | 193 | 17 | 11.0 | 00054-000652 |
| MSCPL91S | 91 | 182 | 17 | 10.5 | 00054-000654 |